

# perfezione senza chirurgia





M.A.S.

### microvibrazione ablativa sensorizzata

La Microvibrazione Ablativa Sensorizzata è una rivoluzione nel trattamento non invasivo del viso.


La Microvibrazione Ablativa si attua tramite un manipolo studiato appositamente per far sì che l'azione esfoliante crei continuità con il trattamento FACE. Il tessuto è sottoposto a un particolare attrito che ha lo scopo di levigare l'epidermide, applicando una maggiore pressione sulle aree pronunciate rispetto a quelle depresse ottenendo così l'effetto esfoliante.

Le microsfere in gel sono posizionate su un asse rotativo e sfalsate di 13,7°. La trazione provocata sul tessuto dall'azione combinata di posizione e movimento delle sfere, causa una rimozione dello strato superficiale di cellule morte, favorendo l'ossigenazione e la rigenerazione del tessuto. La procedura, indolore, è una nuova soluzione per la prevenzione dell'invecchiamento precoce della pelle.

# RISULTATI VISIBILI DALLA PRIMA SEDUTA



#### **EFFETTO ESFOLIANTE**

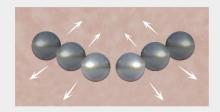

Il posizionamento specifico delle sfere permette al rullo di effettuare un'azione convergente o divergente sull'epidermide che grazie all'attrito sul tessuto, provoca un'esfoliazione dello strato corneo, per un effetto di peeling meccanico che leviga il tessuto e ne migliora l'aspetto, stimolando la rigenerazione

### **RISULTATI**

MIGLIORAMENTO della TEXTURE della PELLE

RASSODAMENTO dell'OVALE

**SOFT PEELING** 

INCREMENTO della LUMINOSITÀ



# **FACE**

### microvibrazione compressiva sensorizzata

Il nuovo manipolo FACE, caratterizzato da un design innovativo ed ergonomico, è l'ultima evoluzione del trattamento viso con metodica a Microvibrazione Compressiva Endosphères<sup>®</sup>. Tre sono le innovazioni fondamentali che permettono di ridurre i tempi di lavoro e di incrementare significativamente il risultato finale:

#### **SISTEMA SENSOR**

Il sistema di sensori e la barra di pressione a led posizionati sul manipolo, **ottimizzano il lavoro dell'operatore** indicando la corretta pressione da applicare in base alla tipologia di tessuto rilevato: ciò conferisce un risultato senza precedenti;

### LA DENSITÀ DELLE SFERE

Le microsfere in esclusivo gel brevettato, con una densità di 15 shore, permettono di **agire in profondità e con maggiore precisione sulla ruga** per un risultato senza dolore né fastidio per la paziente;

### SISTEMA A SCORRIMENTO AUTOLUBRIFICANTE

L'esclusiva innovazione tecnologica realizzata dal reparto engineering di Fenix Group riduce al minimo l'attrito sul tessuto permettendo di lavorare a secco, amplificando e accentuando l'effetto meccanico della Microvibrazione Compressiva.




# EFFETTO VASCOLARIZZANTE




La particolare composizione a cella d'ape degli organi vibratori sul cilindro, in sinergia con la compressione tessutale, agisce effettuando pressioni e sollevamenti, migliorando così significativamente il microcircolo nei distretti interessati.

### **EFFETTO DRENANTE**

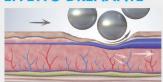

L'Endosphères Therapy® produce un'azione pulsata e ritmica che viene indotta a seconda del senso di rotazione del cilindro e agisce sul sistema linfatico drenando le scorie depositate e creando i presupposti per l'apporto adeguato di nutrienti al tessuto trattato.

### EFFETTO SULL'IPERCONTRATTIVITÀ MUSCOLARE

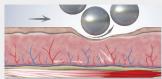

Il sistema a Microvibrazione Compressiva utilizza il muscolo come resistenza attiva favorendo un'azione decontratturante dei muscoli mimici e in generale di tutti i muscoli di viso e collo, determinando un effetto distensivo non paralizzante.

### **RISULTATI**

**RIDUZIONE delle RUGHE** 

AUMENTO dello SPESSORE TESSUTALE

VASCOLARIZZAZIONE TESSUTALE

RIDUZIONE delle RUGHE da MIMICA

AUMENTO del TONO TESSUTALE e MUSCOLARE

MIGLIORAMENTO della STRUTTURA CUTANEA e MUSCOLARE del VOLTO




### vibro elettro veicolatore

Il protocollo EVA si conclude con la III fase.

Il V.E.V., Vibro-Elettro-Veicolatore, favorisce la trasmissione di principi attivi al tessuto, grazie ad impulsi elettrici ad onde quadre.

La peculiarità del trattamento è nella **perfetta** combinazione e consequenzialità delle tre fasi. Il V.E.V. infatti sfrutta l'apertura dei pori risultante dal trattamento a Microvibrazione Compressiva e l'esfoliazione del M.A.S. riducendo la resistenza del derma e facilitando l'ingresso di sostanze in soluzione.

La trasmissione elettrica crea una contrapposizione tra poli positivi e negativi permettendo alla sostanza di essere attirata all'interno del tessuto. Studi scientifici dimostrano che gli impulsi elettrici hanno maggiore efficacia quando hanno una forma quadra e simmetrica, sia per facilitare l'impulso al derma che per stimolare fino al livello muscolare. Inoltre, la maggiore area di irradiazione data dalla forma quadra dell'onda, permette di ottimizzare i tempi di lavoro, grazie alla maggiore intensità, e quindi efficacia, del trattamento.

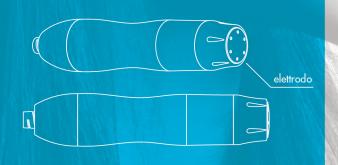


• MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA•

endo SPHERES

THERAPY

#### **AZIONE VEICOLANTE**

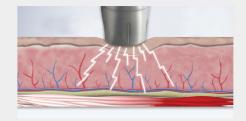

Grazie alle caratteristiche specifiche del manipolo e alla consequenzialità specifica del protocollo di trattamento, l'azione veicolante permette la trasmissione del principio attivo con maggiore efficacia e minor tempo di lavoro, andando a stimolare ulteriormente la componente muscolare sottostante.

### RISULTATI

Il trattamento dà risultati significativi per:

**RUGHE** 

**BORSE** 

**OCCHIAIE** 

**DISCROMIE CUTANEE** 

**TONIFICAZIONE** 







## endo vibrazione ablativa

L'innovativo dispositivo EVA è un concept altamente tecnologico pensato per realizzare un protocollo completo di trattamento per il ringiovanimento del viso, che parte dalla Microvibrazione Compressiva per ampliare il campo d'azione verso altre tipologie di terapia. Il protocollo è suddiviso in tre fasi, con una consequenzialità specifica dettata da una preparazione e stimolazione del tessuto che si evolve nel corso del trattamento e permette di ottenere risultati unici. Il dispositivo è dotato di tre manipoli, ognuno con una funzione specifica. EVA è infatti un'apparecchiatura modulare, con tre manipoli che si abbinano perfettamente nel protocollo di trattamento completo.

- 100% NON INVASIVO
- RIPETIBILE
- EFFICACIA STRAORDINARIA DALLA 1° SEDUTA



### **APPLICAZIONI**

REGIONE LABIALE • REGIONE PERIOCULARE (zampe di gallina)
REGIONE FRONTALE • REGIONE NASO-GENIENA
REGIONE dello ZIGOMO • REGIONE GLABELLARE
TRATTAMENTO SENO • TRATTAMENTO COLLO e DÉCOLLETÉ











- Headquarters ITALY
  - Fenix Group s.r.l. Strada Lungofino, 187 c/o C.C. Ibisco B9/10 Città Sant'Angelo (PE) Tel. +39 085 4483235 info@fenixgroup.it
- Branch Office U.K.

Fenix Group LTD - 51 Holland Street, London W8 7JB Tel: +44(0)2070960040 - ukmanagement@fenixgroup.it

Branch Office SPAIN

Fenix Endospheres Therapy SL - Avda. Barón de Cárcer, 50/1 - Valencia Tel. +34 627 508380 - espmanagement@fenixgroup.it

Branch Office FRANCE

Fenix France S.A.S. - Startway 43-47 Avenue de la Grande Armee - 75016 PARIS Tel: +34(0)170395146 - frmanagement@fenixgroup.it

For other countries look for distributors on www.endospheres.com



ISO 13485-2011: SDS.AR.SMK.00763-14 - ISO 9001-2011: SDS.AR.SMK.00762-14